

RIGID TQ CASE FOR SOFTT/SOFTT-W/SAM XT - ELEVEN 10 RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/MALICE CLIP, ORANGE

[Secours & Survie](#) > [Premiers secours](#) > [Fournitures Premiers Soins](#)

Le RIGID TQ Case pour les tourniquets SOF®TT/SOF®TT-W peut contenir le SOF®TT ou le SOF®TT-Wide. Le RIGID TQ Case® d'Eleven 10® est un étui rigide pour tourniquet conçu pour te donner un accès facile à ton tourniquet lorsque chaque seconde compte. Il peut être porté sur ta ceinture de service, sur un gilet compatible MOLLE/PALS, ou dans la position d'accessoire de ton holster drop leg Safariland®. Le RIGID TQ Case® maintient ton tourniquet en place grâce à la friction, donc il n'y a pas de sangles, de boucles ou de rabats à gérer. Il permet un déploiement véritablement à une main du tourniquet même lorsque tes mains sont ensanglantées ou mouillées. Il te suffit de saisir la partie exposée du tourniquet et, d'un coup sec, il se libère. Le RIGID TQ Case® moulé par injection offre de nombreuses options de montage et d'ajustement de position. Il est compatible avec les solutions de montage Blade-Tech, Safariland® et Tactical Tailor. Beaucoup de ces solutions de montage peuvent être fixées en position verticale ou horizontale. Caractéristiques : Garde ton tourniquet à portée de main pour un déploiement rapide Maintient le SOF®TT/SOF®TT-W grâce à la friction Conçu pour permettre un meilleur contact avec le tourniquet lors du déploiement Étui moulé par injection pour résister à une utilisation intense par les forces de l'ordre/militaire Trou de drainage au bas de l'étui Patch en PVC pour identification médicale inclus Plusieurs positions de montage pour ajuster la bonne hauteur (peut être monté verticalement, horizontalement, incliné ou inversé) Options de montage disponibles - Ceinture de service de police (l'attache Blade-Tech TEK-LOK convient à une ceinture jusqu'à 2.25"), ou attache MOLLE/PALS (clip Malice de Tactical Tailor) Peut être monté sur un shroud drop leg Safariland® dans la position d'accessoire (matériel de montage vendu séparément) REMARQUES : Utilise le Vibra-tite inclus pour sécuriser le matériel en place une fois la configuration désirée obtenue. Des instructions sont incluses. Tous les produits d'Eleven 10® sont conçus, fabriqués et assemblés aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [ELEVEN 10 RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/MALICE CLIP, ORANGE](#)
- Fabricant: [ELEVEN 10](#)
- Référence: 100043728
- N° fabr.: E10-3011M-ORG
- Taille: 1 Person
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 700615668397

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RIGID TQ CASE Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

RIGID TQ CASE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIGID TQ Case pour les tourniquets SOF®TT/SOF®TTW. Cet étui rigide est conçu pour vous fournir un accès rapide et facile à votre tourniquet dans des situations critiques. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le RIGID TQ Case est utilisé uniquement pour le stockage et le transport des tourniquets SOF®TT/SOF®TTW.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'étui et du tourniquet pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel de la santé ou de la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer le tourniquet à sortir de l'étui si vous rencontrez une résistance.
- Utilisez le tourniquet uniquement conformément aux instructions fournies par le fabricant.
- Ne pas utiliser le RIGID TQ Case pour d'autres types de matériel médical ou de sauvetage.
- Évitez de modifier ou d'ajouter des accessoires non approuvés qui pourraient affecter la sécurité du produit.
- En cas d'accident ou de blessure, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Montage sur ceinture de service :**
 - Utilisez l'attache BladeTech TEKLOK pour fixer le RIGID TQ Case à une ceinture de service jusqu'à 2.25 pouces de large.
- **Montage MOLLE/PALS :**
 - Utilisez le clip Malice de Tactical Tailor pour attacher l'étui à un gilet compatible MOLLE/PALS.
- **Position d'accessoire :**
 - Le RIGID TQ Case peut être monté sur un shroud drop leg Safariland®.
- **Déploiement du tourniquet :**
 - Pour accéder au tourniquet, saisissez la partie exposée et tirez d'un coup sec. Assurez-vous que vos mains sont sèches si possible pour un meilleur grip.
- **Drainage :**
 - Vérifiez que le trou de drainage au bas de l'étui n'est pas obstrué pour éviter l'accumulation d'eau.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le RIGID TQ Case ou les tourniquets usés dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour savoir comment se débarrasser des produits médicaux.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RIGID TQ Case, veuillez contacter le service client d'Eleven 10®. Ils sont disponibles pour vous fournir l'assistance nécessaire.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez le RIGID TQ Case de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr